



Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

LFA Okuyucu Barkod Tarayıcılı

Entegre Barkod Tarayıcılı Yanal Akış Analizlerinin kantitatif tayini için okuma cihazı

LFA Reader

REF 190002



Cihazın taşıma kutusu içindeki teslimat durumu

- (1) Taşıma çantası
- (2) Cihaz
- (3) Test kartuşu adaptörü için yuva (cihazın içinde)
- (4) 100V-240V AC / 5V DC güç kaynağı ünitesi ve güç kablosu
- (5) USB kablosu
- (6) Kullanım kılavuzu ve Hasta Veri Görüntüleme yazılımı içeren CD-ROM/USB Bellek
- (7) Yazıcı (isteğe bağlı)
- (8) Cihazın optik parçalarını temizlemek için fırça
- (9) Tornavida

Kısa Kullanım Talimatları LFA Reader

⇒ Alerjen spesifik IgE'nin belirlenmesi için tek ve sekiz şeritli kaset ölçümü (REF 1800010 ve 184000)

- LFA Reader'ı açın, cihazın arkasındaki düğmeye 1 saniye basın
- Ana menü görünene kadar bekleyin
 - √ = enter, ↑↓ = yukarı ve aşağı gezinme düğmeleri, Esc = geri
- **Çıkar**'ı seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın. Test kartuşu adaptörü (yuva) otomatik olarak çıkarılır.
- **Test**'i seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın

Tek kaset (REF 1800010)

- **ALFA 1x**'i seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın
- **Alerjen ve Hasta Seçimi** görüntülenir
 - o Alerjen ve hasta kimliğini seçmek için √ tuşuna basın
- **Hasta oluştur/seç** görüntülenir
 - o # tuşunu kullanarak listeden bir hasta kimliği seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın
- **veya**
 - o Okuyucunun arka tarafındaki harici barkod tarayıcı ile hasta kimliğini barkodla **tarayın**
- **veya**
 - o Klavyeyle yeni hasta kimliği **oluşturun** ve devam etmek için √ tuşuna basın. Giriş modunu sayısal ve alfa-sayısal arasında değiştirmek için . tuşuna basın. * (Not: Hasta veri dosyaları oluşturmak için lütfen Hasta Verileri bölümünde açıklanan talimatları izleyin.)

or

- **Alerjen seçimi görünür**
 - o ↑↓ ile bir alerjen seçin veya → ve ← ile kaydırın
 - o Devam etmek için √ tuşuna basın
- **veya**
 - o Okuyucunun arka tarafındaki harici barkod tarayıcı ile alerjen şişesindeki barkodu tarayarak bir alerjen seçin



- **Alerjen ataması tamamlandı** mesajı görüntülenir
 - o Devam etmek için √ tuşuna veya seçimi düzenlemek için [ESC] tuşuna basın
- **Operatör oluştur/seç** görünür
 - o Bir operatör seçin (# kullanarak) veya oluşturun
 - o Devam etmek için √ tuşuna basın
- Devam etmek için √ tuşuna basın (sarı ekran görüntülenir)
- Tek kaseti yuvaya yerleştirin (lütfen dikkat: kasetin yönü yuvada gösterilmiştir)
- Yuvayı (ve test kasetini) Okuyucuya yerleştirin
- Ölçümü başlatmak için √ tuşuna basın
- Test sonucu görüntülenir
- Sonucu kaydetmek için √ tuşuna, sonucu yazdırmak için # tuşuna veya geri dönmek için Esc tuşuna basın

Sekiz şeritli kaset (REF 184000)

- **ALFA 8x'i** seçin ve devam ettirmek için ✓ tuşuna basın
- **Alerjen ve Hasta Seçimi** görünür
 - 1. İlk test şeridi için alerjeni ve hasta kimliğini seçmek üzere ✓ tuşuna basın
 - 2. **Hasta oluştur / seç** görünür
 - o # tuşunu kullanarak listeden bir hasta kimliği seçin ve devam etmek için ✓ tuşuna basın
 - veya
 - o Okuyucunun arka tarafındaki harici barkod tarayıcısı ile hasta kimliğini barkodla tarayın
 - veya
 - o Klavyeyle yeni hasta kimliği oluşturun ve devam etmek için ✓ tuşuna basın. Giriş modunu sayısal ve alfasayısal arasında değiştirmek için . (Not: Hasta veri dosyaları oluşturmak için lütfen Hasta Verileri bölümünde açıklanan talimatları izleyin)
 - 3. **alerjen seçildiğinde görünür**
 - o ↑↓ ile bir alerjen seçin veya → ve ← ile kaydırın
 - o pdevam etmek için ✓ tuşuna basın
 - veya
 - o Okuyucunun arka tarafındaki harici barkod tarayıcısı ile alerjen şişesindeki barkodu tarayarak bir alerjen seçin

*



- Kalan yedi şerit için 1-3. adımları tekrarlayın
- Sekiz şeridin tamamı için alerjen ve hasta seçimi tamamlandı. **Alerjen ataması tamamlandı.**
 - o Devam etmek için ✓ tuşuna veya seçimi düzenlemek için [ESC] tuşuna basın.
 - o İsteğe bağlı: Sekizden az şeridin ölçümünü başlatmak için # tuşuna basın.
- **Operatör oluştur/seç** görünür.
 - o Bir operatör seçin (# kullanarak) veya oluşturun.
 - o Devam etmek için ✓ tuşuna basın.
- Devam etmek için ✓ tuşuna basın (sarı ekran görünür)
- Sekiz şeritli kaseti yuvaya yerleştirin (lütfen dikkat: kasetin yönü yuvada gösterilmiştir)
- Yuvayı (ve test kasetini) Okuyucuya yerleştirin.
- Ölçümü başlatmak için ✓ tuşuna basın.
- Test sonucu görünür.
- Sonucu kaydetmek için ✓ tuşuna, sonucu yazdırmak için # tuşuna veya geri dönmek için Esc tuşuna basın.

	CE	IVD			REF							
	European conformity	For in-vitro diagnostic use			Catalogue Number	Consult instructions for use	Refer accompanying documents	Do not use when package is damaged			Manu- factured by	

⇒ Toplam IgE tayini için tek şeritli kaset ölçümü (REF 183000)

- LFA Reader'ı açmak için cihazın arkasındaki düğmeye 1 saniye basın
 - Ana menü görünene kadar bekleyin
√= enter, ↑↓ = yukarı ve aşağı gezinme düğmeleri, Esc = geri
 - Çıkar'ı seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın. Test kartuşu adaptörü (yuva) otomatik olarak çıkarılır.
 - Test'i seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın
 - ALFA Toplam IgE'yi seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın
 - Hasta Seçimi görüntülenir
 - o Alerjeni ve hasta kimliğini seçmek için √ tuşuna basın
 - Hasta oluştur/seç görüntülenir
 - o # tuşunu kullanarak listeden bir hasta kimliği seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın
- veya
- o Okuyucunun arka tarafındaki harici barkod tarayıcıyla hasta kimliğini barkodla tarayın

veya

- o Klavyeyle yeni hasta kimliği oluşturun ve devam etmek için √ tuşuna basın. Giriş modunu sayısal ve alfa-sayısal arasında değiştirmek için . tuşuna basın. (Not: Hasta veri dosyaları oluşturmak için lütfen Hasta Verileri bölümünde açıklanan talimatları izleyin.)
- Oluştur/Seç operatörü görünür
 - o Seç (# kullanarak) veya bir operatör oluşturun
 - o Devam etmek için √ tuşuna basın
- Devam etmek için √ tuşuna basın (sarı ekran görünür)
- Tek kaseti yuvaya yerleştirin (lütfen dikkat: kasetin yönü yuvada gösterilmiştir)
- Yuvayı (ve test kasetini) Okuyucuya yerleştirin
- Ölçümü başlatmak için √ tuşuna basın
- Test sonucu görünür
- Sonucu kaydetmek için √ tuşuna, sonucu yazdırmak için # tuşuna veya geri dönmek için Esc tuşuna basın

⇒ Patient data (create or recall patient data files)

- Hasta verilerini seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın
 - Hasta verilerini düzenle seçeneği görünür
- Yeni hasta verileri oluştur'u seçin ve devam etmek için √ tuşuna basın (navigasyon için ekranda gösterilen talimatları izleyin)
- Hasta kimliğini eklemek için √ tuşuna basın
 - Soyadını eklemek için iki kez √ tuşuna basın
 - Adı eklemek için iki kez √ tuşuna basın
 - Doğum gününü eklemek için iki kez √ tuşuna basın
 - Doğum ayını eklemek için iki kez √ tuşuna basın
 - Doğum yılını eklemek için iki kez √ tuşuna basın
 - √ tuşuna basın
 - Hasta verilerini √ ile kaydedin
- Mevcut bir hasta kimliğini seçin ve hasta ölçüm sonuçlarını görüntülemek için √ tuşuna basın
- Mevcut bir hasta kimliğini seçin ve hasta verilerini düzenlemek için # tuşuna basın

	European conformity	For in-vitro diagnostic use			Catalogue Number	Consult instructions for use	Refer accompanying documents	Do not use when package is damaged			Manu-factured by	



Ayar

- Ayarlar'ı seçin ve devam etmek için ✓ tuşuna basın
- dili seçin
 - tarih ve saat ekleyin
 - hasta verilerini silin



Kapamak

- LFA Reader'ı kapatmak için cihazın arkasındaki düğmeye 2 saniye basın



DR . FOOKE

Laboratorien GmbH Tel.: 0049-2131-2984-0
Habichtweg 16 Fax: 0049-2131-2984-184
4 1 4 6 8 Neuss
E-mail: information@fooke-labs.de
Internet: www.fooke-labs.de

	European conformity	For <i>in-vitro</i> diagnostic use			Catalogue Number	Consult instructions for use	Refer accompanying documents	Do not use when package is damaged			Manu- factured by	